

schülke -+



Neutralisator auf Basis von Zitronensäure zur maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten und Laborutensilien



thermosept® NKZ

Unser Plus

- phosphat- und tensidfrei
- hervorragende Materialverträglichkeit
- sichere Neutralisation bei Verschleppung von Alkalität aus dem Reinigungsschritt
- beugt Ablagerungen und Verfärbungen an Geräten und Spülgut vor

Anwendungsgebiet

thermosept® NKZ wird zur Neutralisation nach alkalischer Reinigung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, Edelstahlcontainern, starren Endoskopen, Anästhesiematerial, OP-Schuhen, Babyflaschen und Laborutensilien empfohlen. Nach neutraler Reinigung mit z.B. thermosept® RKN-zym kann durch thermosept® NKZ das Reinigungsergebnis optimiert und Ablagerungen sowie Verfärbungen vermieden werden. Das Produkt ist ebenfalls geeignet zur phosphatfreien Reinigung von Laborglas und zur sauren Vorreinigung von chirurgischen (Edelstahl)-Instrumenten. thermosept® NKZ ist für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen geeignet.

Anwendungshinweise

Dosierung:

nach alkalischer Reinigung: 0,1 - 0,2 % (1 - 2 ml/l)

nach neutraler Reinigung: 0,1 % (1 ml/l)

Generell wird die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen.

Dosierung zur sauren Vorreinigung/Reinigung von säurebeständigen Materialien: 0,2 - 0,5 % (2 - 5 ml/l) bei 40 - 60°C bei einer Einwirkzeit von max. 30 min. Auf ein gründliches

Abspülen mit vollentsalztem Wasser ist zu achten. Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Geräte- und Instrumentenhersteller.

Produktdaten

Zusammensetzung:
organische Säuren

Bestellinformation

Artikel		Lieferform	GTIN	Art.-Nr.
thermosept NKZ	5 kg KA	1 / Kanister	4032651465033	146503
thermosept NKZ	200 kg FA	1 / Fass(Fässer)	4032651465064	146506

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 20 + 25 l	135901
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

Verwandte Produkte

- thermosept® RKF

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



schülke -+

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1
und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.