

DESCOCEPT SPEZIAL



PREVENT

OBERFLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG NICHTINVASIVER MEDIZINPRODUKTE
MIT UND OHNE MECHANISCHE EINWIRKUNG

1 / 8

Geeignet für **alkoholempfindliche
Flächen und Medizinprodukte**

Kurze Einwirkzeiten ermöglichen einen
schnellen Einsatz der Oberflächen

Reinigung und Desinfektion in nur einem Schritt

Geeignet für Oberflächen aus Acrylglas



**Schaumapplikation zur
Verhinderung von Aerosolen**

IHO

ÖGHMP

VAH

HACCP

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT SPEZIAL



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 8

DESCOCEPT SPEZIAL ist eine Oberflächendesinfektion und -reinigung nicht-invasiver Medizinprodukte mit und ohne mechanische Einwirkung. Das Produkt eignet sich zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie von Flächen in den Bereichen der Industrie und öffentlichen

Einrichtungen. Außerdem ist es für alkoholempfindliche Medizinprodukte und Flächen sowie für Acrylglas geeignet. Wirkt auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen. **DESCOCEPT SPEZIAL** enthält keine Alkohole, Aldehyde und Phenole und ist außerdem geruchsneutral.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen und medizinischem Inventar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung.
Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen.

Wischapplikation: Die zu desinfizierenden Flächen vollständig abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Sprühapplikation: Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf Flächen aufbringen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem nassen Tuch (Wasser geeigneter Qualität) abwischen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

DESCOCEPT SPEZIAL kann als Wischdesinfektion oder Schaum-Sprühapplikation (ohne Nachwischen) verwendet werden.

Zusammensetzung

100 g enthalten: 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten. (siehe Seite 4 – 7)

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT SPEZIAL



PREVENT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 8



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			1 min	2 min	5 min
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit Mechanik gemäß EN 14885					
bakterizid, levurozid	EN 13727 EN 13624 EN 16615	hohe Belastung	•		
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•		
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion ohne Mechanik gemäß EN 14885					
bakterizid, levurozid	EN 13727 EN 13624 EN 17387	hohe Belastung			•
begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	niedrige und hohe Belastung	•		
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion in nicht-medizinischen Bereichen gemäß EN 14885					
bakterizid, levurozid	EN 1276 EN 1650 EN 13697	hohe Belastung	•		

DESCOCEPT SPEZIAL



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

4 / 8



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2A				• Medizinische Transportstühle • Transportwagen
Aluminium				• Rollatoren •

DESCOCEPT SPEZIAL



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 8



MATERIAL KUNSTSTOFFE: ELASTOMERE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PUR (Polyurethan)			•	Medizinische Transportstühle
			•	Armaturenbretter
Silikon			•	Gesichtsmasken
			•	Open-Cuff Gesichtsmaske
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)			•	Pflegewagen
CR (Chloropren-Kautschuk)			•	

DESCOCEPT SPEZIAL



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

6 / 8



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PA (Polyamid)			•	Röntgenschürzen
PE-HD (Polyethylen-High Density)			•	Lager- und Transportbehälter
PVC (Polyvinylchlorid)			•	
PMMA (Polymethylmethacrylat)			•	Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren
POM (Polyoxymethylen)			•	Sitzschalen
PSU (Polysulfon)			•	
EPP (expandiertes (geschäumtes) Polypropylen)			•	Faszienrollen
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)	•			Perfusoren
	•			Ultraschallgeräte
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)	•			Röntgengeräte
	•			Patientenüberwachungsmonitore

DESCOCEPT SPEZIAL



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

7 / 8



MATERIAL TEXTILIEN	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Kunstleder (z.B. mit PVC und PUR-Deckschicht)			● *	Untersuchungs- und Behandlungsliegen
			● *	Lagerungshilfen
			● *	Gynäkologischer Untersuchungsstuhl
			● *	Dentalstühle
			● *	OP-Liegen
			● *	Patiententransportliegen

* Bei diesen Materialien die Materialverträglichkeit vorab an einer kleinen unauffälligen Stelle testen.

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSMITTEL

DESCOCEPT SPEZIAL



PREVENT

GEBINDE

8 / 8

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT SPEZIAL	Flasche	20	500 ml	00-208-005	10045713
	Sprühflasche	6	750 ml	00-208-0075	14334621
	Flasche	10	1 L	00-208-010	07396797
	Kanister	3	5 L	00-208-050	07396805
Dosierhilfen	Schaumsprühkopf	1 L	1	00-912-010	-
	Sprühkopf (Spenderflasche)	1 L	1	00-905-010	-
	Kanisterumfüllhahn	2 L/5 L/10 L	1	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050	-

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  0123

ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.