

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

OBERFLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG NICHTINVASIVER MEDIZINPRODUKTE
MIT MECHANISCHER EINWIRKUNG

1 / 8

Gebrauchsfertige Tücher im **wiederverschließbaren
Vliestuchspender**

Alkoholfreie Formulierung

Große Tücher für Flächen **im Bereich der Routine**



FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 8

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES sind Tücher zur Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung. Die großformatigen alkoholfreien Tücher (30 x 32 cm) ermöglichen eine zeitsparende und effiziente Anwendung bei Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art im Bereich der Routine. Sie lassen sich einzeln aus dem gewohnten Vliestuchspender mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen

und sind sofort einsatzbereit. **DESCOCEPT SPEZIAL WIPES** zeigen eine effektive Wirkung gegen Bakterien, Hefen (einschließlich *C. auris*) und behüllte Viren. Jedem Nachfüllpack liegt unser ULTRASOL OXY SACHET bei, welches eine KRINKO-gerechte Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders ermöglicht.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Flächen mit DESCOCEPT SPEZIAL WIPES bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem nassen Tuch (Wasser geeigneter Qualität) abwischen.

Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 0,5 g Alkyl(C₁₂₋₁₆)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf Oberflächen und Medizinprodukten. (siehe Seite 4 – 7)

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFektionSTÜCHER

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 8



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			1 min	2 min
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion gemäß EN 14885				
bakterizid ¹ , levurozid ¹	VAH/EN ²	mit Mechanik, hohe Belastung	•	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	•	
Ergänzende Prüfergebnisse				
bakterizid	EN 16615	hohe Belastung	•	
	EN 13727	hohe Belastung	•	
	EN 1276	hohe Belastung	•	
levurozid (C. albicans)	EN 16615	hohe Belastung	•	
	EN 13624	hohe Belastung	•	
	EN 1650	hohe Belastung	•	
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung		•

¹ – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

² – EN 13624, EN 13727, EN 16615

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

4 / 8



MATERIAL METALLE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Edelstahl V2A			• Medizinische Transportstühle	
			• Transportwagen	
Aluminium			• Rollatoren	

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

5 / 8



MATERIAL KUNSTSTOFFE: ELASTOMERE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PUR (Polyurethan)			•	Medizinische Transportstühle
			•	Armaturenbletter
Silikon			•	Gesichtsmasken
			•	Open-Cuff Gesichtsmaske
			•	Medizinische Tastaturen und Mäuse
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk)			•	Pflegewagen
CR (Chloropren-Kautschuk)			•	

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

6 / 8



MATERIAL KUNSTSTOFFE: THERMOPLASTE	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
PA (Polyamid)			•	Röntgenschürzen
PE-HD (Polyethylen-High Density)			•	Lager- und Transportbehälter
PVC (Polyvinylchlorid)			•	
PMMA (Polymethylmethacrylat)			•	Acryl- und Plexiglas, Inkubatoren
POM (Polyoxymethylen)			•	Sitzschalen
PSU (Polysulfon)			•	
EPP (expandiertes (geschäumtes) Polypropylen))			•	Faszienrollen
PC (Polycarbonat z.B. Makrolon)	•			Perfusoren
	•			Ultraschallgeräte
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer)	•			Röntgengeräte
	•			Patientenüberwachungsmonitore

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

7 / 8



MATERIAL TEXTILIEN	nicht empfohlen	bedingt empfohlen	empfohlen	ANWENDUNGEN PRODUKTBEISPIELE
Kunstleder (z.B. mit PVC und PUR-Deckschicht)				• Untersuchungs- und Behandlungsliegen
				• Lagerungshilfen
				• Gynakologischer Untersuchungsstuhl
				• Dentalstühle
				• OP-Liegen
				• Patiententransportliegen

FLÄCHE / GEBRAUCHSFERTIGE DESINFEKTIONSTÜCHER

DESCOCEPT SPEZIAL WIPES



PREVENT

GEBINDE

8 / 8

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Tuchgröße	Art. Nr.	PZN
DESCOCEPT SPEZIAL WIPES	Vliestuchspender	1	100 Tücher	30 x 32 cm	00-208-ERS100-01	-
	Nachfüllpack	2	100 Tücher	30 x 32 cm	00-208-RS100-01	12410967
	Wandhalterung	1	-	-	00-902-EIM	-

Die Verfügbarkeit der Produkte und Gebinde ist abhängig von einer erfolgten nationalen Registrierung.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001,
verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.